

# Alco selftest®

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το Alco selftest® προορίζεται σαν δοκιμασία αυτοελέγχου για τον έλεγχο της περιεκτικότητας σε αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα. Μπορείτε άμεσα να προσδιορίσετε την περιεκτικότητα σε αλκοόλ στο αίμα με ακρίβεια 0,2‰\*(permille), δηλαδή 0,1 mg/L στον εκπνεόμενο αέρα.

Για να επιτευχθεί το πιο ακριβές αποτέλεσμα, η μέτρηση θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον 15 λεπτά μετά την τελευταία κατανάλωση αλκοόλ. Το κάπνισμα, καθώς και η κατανάλωση ορισμένων τροφών και ποτών, μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβές αποτέλεσμα της εξέτασης, επομένως θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 15 λεπτά μετά το τελευταίο τσιγάρο ή/και φαγητό/ποτό πριν ξεκινήσετε τη δοκιμή.

### Εξαρτήματα - συσκευής δοκιμασίας

Η δοκιμή προσδιορισμού αλκοόλης κατά την εκπνοή αποτελείται από έναν γυάλινο σωλήνα, που περιλαμβάνει υλικό μέτρησης - ένα αντιδραστήριο, κόκκους προσρόφησης, φίλτρα, φύλλο αλουμινίου και δύο προστατευτικά καπάκια.


### Προσοχή - ενημέρωση

Τα επιμέρους συστατικά τη δοκιμασίας μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή ή/και την υγεία, σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης. Ο γυάλινος σωλήνας μπορεί να σπάσει ή να θρυμματιστεί και να προκαλέσει κοψίματα, άλλα μέρη μπορεί να καταποθούν. Μετά τη χρήση, το Alco selftest® πρέπει να πεταχτεί στα οικιακά απορρίμματα. Το χρησιμοποιημένο τεστ δεν αποτελεί απειλή για το περιβάλλον σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ. Συνιστάται να μην αφήνετε το χρησιμοποιημένο τεστ σε μέρη όπου θα μπορούσε να πέσει σε μη εξουσιοδοτημένα χέρια.


### Διαδικασία εφαρμογής

**1.** Ανοίξετε την συσκευασία και τοποθετήστε κάθετα ανάμεσα στις παλάμες το Alco selftest®

**2.** Ασκίστε πίεση ταυτόχρονα από τα δύο χέρια σας μέχρι να νιώσετε ότι τα άκρα του τεστ εισχώρησαν πιο μέσα θα ακούσετε ένα ελαφρύ κρακ που δηλώνει την ενεργοποίηση της δοκιμασίας

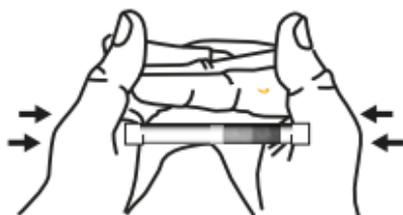

**3.** Πάρτε μια βαθιά αναπνοή και στη συνέχεια φυσήξτε την στο επιστόμιο/γυάλινο σωλήνα (δύο φορές για περίπου 10 δευτερόλεπτα) από το σημείο που έχει κόκκινη ένδειξη του στομίου.

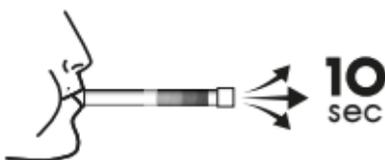

**4.** Περιμένετε τουλάχιστον 2 λεπτά. Εάν το χρώμα στο μεσαίο τμήμα του γυάλινου σωλήνα αλλάξει, σημαίνει ότι το άτομο εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την επίρεια αλκοόλ.

Διαβάστε σε 2 λεπτά το αποτέλεσμα μετά από 5 λεπτά χρήσης, το αποτέλεσμα της δοκιμής μπορεί να έχει ήδη γίνει αναξιόπιστο.

**5.** Συγκρίνετε το χρώμα που προκύπτει με το χρωματολόγιο στη

συσκευασία. Η πιο ακριβής σύγκριση μπορεί να επιτευχθεί με καλό φως ή μόνο στο φως της ημέρας. Εάν το χρώμα που λαμβάνεται είναι παρόμοιο με αυτό της κλίμακας ως 0,2‰\* (ανά ml), αυτό σημαίνει περιεκτικότητα σε αλκοόλ στο αίμα ίση με 0,2‰\* (ανά ml) ή μεγαλύτερη ανάλογα την χρωματική διαβάθμιση.

### **Προφυλάξεις :**

- 1.** Το αλκοτέστ πρέπει να φυλάσσεται σε μέρος μακριά από παιδιά.
- 2.** Απαγορεύεται η εκχύλιση της ουσίας που περιέχεται στο τεστ αλκοόλης.
- 3.** Συνιστάται να μην πραγματοποιείτε τη μέτρηση αφού γεμίσετε το καθαριστικό τζαμιών του αυτοκινήτου που περιέχει αλκοόλ, καθώς οι αναθυμιάσεις που προκύπτουν μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της δοκιμής.
- 4.** Θα πρέπει να αποφεύγεται η άμεση επαφή της ουσίας μέτρησης με τα μάτια και το δέρμα.
- 5.** Η ουσία δοκιμής που βρίσκεται εσωτερικά στη συσκευή δοκιμασίας δεν πρέπει να εισπνέεται ή να καταποθεί.
- 6.** Μην πετάτε το τεστ στη φωτιά.
- 7.** Εάν η ουσία δοκιμής έρθει σε επαφή με τα μάτια, το βλέφαρο πρέπει να ανοίξει διάπλατα και να ξεπλυθεί με άφθονο νερό. Στη συνέχεια, πρέπει να αναζητηθεί αμέσως ιατρική βοήθεια, ενώ η επίσκεψη σε οφθαλμίατρο θα ήταν επίσης πολύ απαραίτητη.
- 8.** Εάν η ουσία μέτρησης έρθει σε επαφή με το δέρμα, η περιοχή πρέπει να ξεπλυθεί με άφθονο νερό. Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος (ερυθρότητα, εξανθήματα, αλλεργικές αντιδράσεις, πληγές) αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Στη συνέχεια, μια επίσκεψη στον δερματολόγο είναι επίσης εξαιρετικά απαραίτητη.
- 9.** Εάν η υπό δοκιμή ουσία καταποθεί, πιείτε μεγάλη ποσότητα νερού. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- 10.** Εάν εισπνεύσετε την ουσία μέτρησης μεταβείτε αμέσως στον καθαρό αέρα. Μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με γιατρό.

### **Συμβουλές αποθήκευσης:**

- 1.** Προστατέψτε από την ηλιακή ακτινοβολία και τις υψηλές θερμοκρασίες.
- 2.** Φυλάσσετε σε ξηρό και ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη για το αποτέλεσμα της δοκιμής.

Το Alcoselftest®  
Αντιπροσωπεύεται  
εμπορικά και διανέμεται  
αποκλειστικά από την



DyonMed S.A.  
Point of Care Solutions

### **DYONMED A.E Εταιρία ανάπτυξης κατασκευής και εμπορίας Point of care tests**

Λ. Λαυρίου 182-184, 15354 Γλυκά Νερά Αθήνα, Ελλάδα,  
τηλ.: 210 6655494-5, customerservice@dyonmedical.com

**[www.dyonmedical.com](http://www.dyonmedical.com)**

Ακολουθήστε μας  /DyonmedSA  /dyonmed\_ae